

Anschluss für das Cleanse P



Das Cleanse P wird an den Turbinenanschluss angeschlossen



Drehen Sie die Verbindung zwischen Multiflex-Kupplung und Turbinenschlauch auf



Ziehen Sie den Turbinenschlauch ab



Nehmen Sie den Turbinenschlauch in die Hand



Stecken Sie den Turbinenschlauch auf die Kupplung am Cleanse P



Drehen Sie die Schraubverbindung mit der Hand zu



Das Gerät kann verwendet werden. Die Steuerung erfolgt über den Fußanlasser der Behandlungseinheit.